

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

K18

Адаптер сдвижной (линейно- регулируемый)

Сдвижной адаптер модульного протеза



M1–M2

Группы подвижности



100 кг

Макс. масса пользователя



W1

Влагостойкость



Алюминий

Материал

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/K18.pdf



K18

Адаптер сдвижной (линейно-регулируемый)



M1-M2
Активность



100 кг
Макс. нагрузка



W1
Влагостойкость

Коленный модуль с ручным/механическим замком.

Масса изделия	311 г
Макс. нагрузка	100 кг
Материал	алюминий
Соединения	Пирамида / Трубный зажим

K18
стр. 40

Изделие является комплектующим протеза. Подбор, установка, юстировка и затяжка соединений выполняются только специалистом по протезированию. Пользователь не регулирует изделие и не разбирает его.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Сдвижной (линейно-регулируемый) адаптер позволяет специалисту сместить один модуль протеза относительно другого, когда прямое соединение не выводит стопу под линию нагружения. После юстировки положение фиксируется винтами.

- Группы подвижности **M1–M2**; предельная масса пользователя с учётом переносимого груза — **100 кг**.
- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Регулировочный узел воспринимает увеличенный изгибающий момент. Ослабление винтов приводит к смещению узла, изменению геометрии протеза и падению. Не переставляйте и не подтягивайте узел самостоятельно.



Осмотр перед
каждым использованием



Винты
не трогать



Узел
не переставлять



Контроль у специалиста
ежегодно



При люфте —
к специалисту

- Проверяйте, не изменилось ли положение узла относительно следов затяжки.
- Не подтягивайте и не заменяйте винты: они затягиваются нормированным моментом с фиксатором резьбы.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W1 — брызгозащищённое исполнение. Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна не допускаются. После намокания вытрите изделие насухо и просушите при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от -10 до $+45$ °C; хранения и транспортировки от -20 до $+60$ °C, без ударов и вибраций.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Люфт или скрип	Прекратите использование и обратитесь к специалисту
Изменение походки	Покажите протез специалисту — возможно смещение узла

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Протирайте изделие влажной мягкой тканью с мягким мылом, затем вытрите насухо.
2. При необходимости продезинфицируйте поверхность салфеткой с изопропиловым спиртом.
3. Не применяйте растворители, отбеливатели, абразивы, сжатый воздух и мойку под давлением.

Срок / событие	Объём проверки
Перед каждым использованием	внешний осмотр изделия пользователем
Не реже 1 раза в год	контроль у специалиста, проверка соединений и настроек
После удара, падения, перегрузки	внеплановая проверка у специалиста

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **2 года**; гарантийный срок — **12 месяцев** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Гарантия не распространяется на повреждения из-за превышения нагрузки, самостоятельной разборки или регулировки, недопустимых сред и нарушения инструкции.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ положение узла не изменилось;
- ☐ винты не выступают и не ослаблены;
- ☐ изделие сухое и чистое.

Заполняет специалист	
Исполнение / размер / настройки	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия