

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

L01

Силиконовый лайнер RENA

Лайнер для приёмной гильзы протеза



M3–M4

Группы подвижности



125 кг

Макс. масса пользователя



W1

Влагостойкость



Силикон

Материал

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/L01.pdf

КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ · ИЗ КАТАЛОГА BIONIKA TECH 2026

L01

Силиконовый лайнер REHA

Медицинский силикон

АК — бедро

ВК — голень



L01-AK · для протеза бедра



L01-BK · для протеза голени

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Силиконовый лайнер создаёт мягкий контактный слой между культёй и приёмной гильзой. Эластичная оболочка помогает распределять контактную нагрузку и уменьшать трение при движении. В замковом исполнении дистальное соединение участвует в подвеске протеза; исполнение без пина используется с соответствующей системой удержания.

ИСПОЛНЕНИЯ

L01-AK	Для бедра
L01-BK	Для голени
Подвеска	Замковое исполнение с пином / исполнение без пина
Материал	Силикон с наружным текстильным покрытием

ПОДБОР

При подборе учитывают уровень ампутации, форму и объём культы, состояние мягких тканей и способ подвески протеза. Замковое исполнение требует совместимого пина и замка; вариант без пина подбирают вместе с системой удержания.

Размер и исполнение согласуют со специалистом по протезированию.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45 см.

Мягкий контакт с культёй	Текстильное покрытие	Замковое и беззамковое исполнение
--------------------------	----------------------	-----------------------------------

Толщина и точная таблица измерения уточняются для выбранного заводского исполнения.

Лайнер надевается непосредственно на кожу культы. Подбор размера, толщины и исполнения (замковое или смягчающее) выполняет специалист по протезированию.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Лайнер защищает кожу культы, распределяет нагрузку и уменьшает смещение мягких тканей в гильзе. Замковое исполнение с дистальным пином фиксируется в замке гильзы; смягчающее применяется при вакуумном или наружном подвесе.

- Лайнер REHA; исполнение L01-AK — для бедра, L01-BK — для голени.
- Группы подвижности **М3–М4**; предельная масса пользователя с учётом переносимого груза — **125 кг**.
- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Не надевайте лайнер на повреждённую кожу: ссадины, раны, воспалённые участки. При стойком покраснении, боли, сыпи или мокнущи прекратите пользование протезом и обратитесь к специалисту или врачу.

				
Ежедневно осматривать кожу и лайнер	Мыть ежедневно, сушить наизнанку	Самостоятельно не подрезать	Только для одного пациента	При покраснении — к специалисту

- Кратковременное покраснение после снятия протеза должно проходить за 10–15 минут; стойкое — повод обратиться к специалисту.
- Берегите лайнер от острых предметов, ногтей и украшений.
- Не наносите под лайнер кремы, масла и лосьоны без назначения специалиста.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W1 — брызгозащищённое исполнение. Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна не допускаются. После намокания вытрите изделие насухо и просушите при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С, без ударов и вибраций.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Надевание	Выверните лайнер, приложите к торцу культы и раскатайте вверх без складок и воздушных карманов
Замковое исполнение	Вводите пин строго по оси до срабатывания замка; проверьте фиксацию
Снятие	Скатайте лайнер вниз, выворачивая наизнанку
Изменение посадки	Если лайнер стал заметно свободнее или туже — к специалисту

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Мойте лайнер ежедневно: выверните и промойте тёплой водой с мягким мылом без отдушек.
2. Смойте мыло, промокните и сушите наизнанку при комнатной температуре.
3. Храните в расправленном виде; второй лайнер в ротации продлевает срок службы обоих.

Срок / событие	Объём проверки
Ежедневно	осмотр кожи и лайнера, мытьё
Не реже 1 раза в 6 месяцев	проверка посадки у специалиста
При порезе или разрыве	замена лайнера

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **12 мес.**; гарантийный срок — **6 месяцев** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Гарантия не распространяется на порезы, проколы, разрывы, воздействие кремов и растворителей и естественный износ.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ кожа культи без стойкого покраснения и потёртостей;
- ☐ на лайнере нет порезов и разрывов;
- ☐ лайнер вымыт и высушен;
- ☐ пин (при наличии) чистый.

Заполняет специалист	
Размер / толщина / исполнение	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия