

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

L02-03

Лайнер ALPS Extreme

Лайнер для приёмной гильзы протеза



M1–M3

Группы подвижности



125 кг

Макс. масса пользователя



W1

Влагостойкость



Grip Gel

Материал

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/L02-03.pdf

КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ · ИЗ КАТАЛОГА BIONIKA TECH 2026

L02-03

Лайнер ALPS Extreme



M1–M3

Grip Gel

Толщина 3 / 6 мм



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Extreme сочетает мягкость геля Grip Gel с тканевым покрытием, ограничивающим растяжение по вертикали. Такое сочетание помогает уменьшить поршневое перемещение и сохранить управляемость протезом. Гель амортизирует вертикальные и сдвиговые нагрузки, а его адгезионные свойства поддерживают контакт лайнера с культи. Предусмотрены замковое и смягчающее исполнения.

КОНСТРУКЦИЯ

Параметр	Исполнение
Материал	Grip Gel — контракционный гель
Покрытие	Коричневое тканевое покрытие с ограничением вертикального растяжения
Применение	Замковая или смягчающая конструкция
Коды ALPS	AKDT / AKFR


Контакт с кожей за счёт Grip Gel

Ограниченное растяжение по вертикали


Замковое и смягчающее исполнения

СЕЧЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ

AKFR · смягчающий

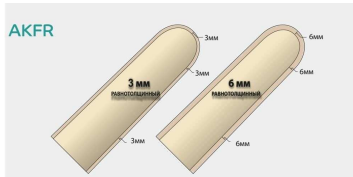

AKDT · замковый

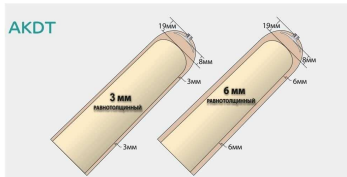

Подбор размера



Окружность измеряют в 6 см выше дистального конца культи.

РАЗМЕРЫ И ВАРИАНТЫ ЗАКАЗА

Окружность, см	Замковое исполнение	Смягчающее исполнение
16–19	AKDT16-3 / AKDT16-6	AKFR16-3 / AKFR16-6
20–23	AKDT20-3 / AKDT20-6	AKFR20-3 / AKFR20-6
24–25	AKDT24-3 / AKDT24-6	AKFR24-3 / AKFR24-6
26–27	AKDT26-3 / AKDT26-6	AKFR26-3 / AKFR26-6
28–31	AKDT28-3 / AKDT28-6	AKFR28-3 / AKFR28-6
32–37	AKDT32-3 / AKDT32-6	AKFR32-3 / AKFR32-6
38–43	AKDT38-3 / AKDT38-6	AKFR38-3 / AKFR38-6
44–53	AKDT44-3 / AKDT44-6	AKFR44-3 / AKFR44-6

Коды после дефиса обозначают толщину стенки: 3 или 6 мм. Дистальная конструкция показана на сечениях.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Укажите артикул BIONIKA L02-03 и полный код ALPS.

AKDT24-6 — замковый лайнер, окружность 24–25 см, толщина 6 мм.

Источник: каталог ALPS, стр. 48–49.

Лайнер надевается непосредственно на кожу культы. Подбор размера, толщины и исполнения (замковое или смягчающее) выполняет специалист по протезированию.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Лайнер защищает кожу культы, распределяет нагрузку и уменьшает смещение мягких тканей в гильзе. Замковое исполнение с дистальным пином фиксируется в замке гильзы; смягчающее применяется при вакуумном или наружном подвесе.

- Группы подвижности **M1–M3**; предельная масса пользователя с учётом переносимого груза — **125 кг**.
- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Не надевайте лайнер на повреждённую кожу: ссадины, раны, воспалённые участки. При стойком покраснении, боли, сыпи или мокнущи прекратите пользование протезом и обратитесь к специалисту или врачу.



Ежедневно осматривать
кожу и лайнер



Мыть ежедневно,
сушить наизнанку



Самостоятельно
не подрезать



Только для
одного пациента



При покраснении —
к специалисту

- Кратковременное покраснение после снятия протеза должно проходить за 10–15 минут; стойкое — повод обратиться к специалисту.
- Берегите лайнер от острых предметов, ногтей и украшений.
- Не наносите под лайнер кремы, масла и лосьоны без назначения специалиста.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W1 — брызгозащищённое исполнение. Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна не допускаются. После намокания вытрите изделие насухо и просушите при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С, без ударов и вибраций.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Надевание	Выверните лайнер, приложите к торцу культы и раскатайте вверх без складок и воздушных карманов
Замковое исполнение	Вводите пин строго по оси до срабатывания замка; проверьте фиксацию
Снятие	Скатайте лайнер вниз, выворачивая наизнанку
Изменение посадки	Если лайнер стал заметно свободнее или туже — к специалисту

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Мойте лайнер ежедневно: выверните и промойте тёплой водой с мягким мылом без отдушек.
2. Смойте мыло, промокните и сушите наизнанку при комнатной температуре.
3. Храните в расправленном виде; второй лайнер в ротации продлевает срок службы обоих.

Срок / событие	Объём проверки
Ежедневно	осмотр кожи и лайнера, мытьё
Не реже 1 раза в 6 месяцев	проверка посадки у специалиста
При порезе или разрыве	замена лайнера

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **12 мес.**; гарантийный срок — **6 месяцев** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Гарантия не распространяется на порезы, проколы, разрывы, воздействие кремов и растворителей и естественный износ.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ кожа культи без стойкого покраснения и потёртостей;
- ☐ на лайнере нет порезов и разрывов;
- ☐ лайнер вымыт и высушен;
- ☐ пин (при наличии) чистый.

Заполняет специалист	
Размер / толщина / исполнение	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия