

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

L11

Наколенник ALPS Flex Sleeve SFX

Гелевый наколенник для подвеса протеза голени



W1

Влагостойкость

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/L11.pdf

КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ · ИЗ КАТАЛОГА BIONIKA TECH 2026

L11

Наколенник ALPS Flex Sleeve SFX

M2–M4

HD Gel

Толщина 3 мм

ALPS Flex Sleeve



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Гелевое крепление для подвески протеза голени. Гель высокой плотности HD Gel сочетает амортизацию с контролем протеза. Бесшовное трикотажное покрытие и предварительное сгибание на 30° облегчают движение колена и уменьшают образование складок в подколенной области.

КОНСТРУКЦИЯ


Материал	Гель высокой плотности HD Gel
Покрывтие	Бесшовный трикотаж
Профиль	Равнотолщинный, 3 мм
Предварительное сгибание	30°
Цвета	B — бежевый; G — серый
Применение	Подвеска протеза голени

Меньше складок под коленом

Защита от вертикальных и сдвиговых нагрузок

Надёжная подвеска

СЕЧЕНИЯ И ПОДБОР РАЗМЕРА

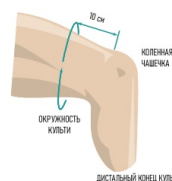

Измерьте окружность на 10 см выше коленной чашечки.

РАЗМЕРЫ И ВАРИАНТЫ

Окружность, см	Бежевый B	Серый G
34–37	SFX20-3B	SFX20-3G
36–39	SFX23-3B	SFX23-3G
38–42	SFX26-3B	SFX26-3G
41–46	SFX29-3B	SFX29-3G
45–50	SFX32-3B	SFX32-3G

Пример: L11 · SFX26-3B — бежевый, 3 мм, окружность 38–42 см.

ALPS, каталог поставщика, стр. 68–69.

Наколенник надевается поверх протеза и бедра. Подбор размера выполняет специалист по протезированию.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Гелевый наколенник удерживает протез голени, создавая герметичное соединение между гильзой и бедром. Предварительное сгибание 30° облегчает движение колена и уменьшает складки в подколенной области.

- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Разрыв или прокол наколенника нарушает герметичность подвеса, и протез может соскользнуть. Берегите изделие от острых предметов; при повреждении прекратите использование и замените наколенник.

				
Осмотр на проколы и разрывы	Мыть ежедневно	Самостоятельно не подрезать	Только для одного пациента	При раздражении кожи — к специалисту

- Не надевайте на повреждённую кожу.
- Берегите от ногтей, украшений и острых кромок гильзы.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W1 — брызгозащищённое исполнение. Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна не допускаются. После намокания вытрите изделие насухо и просушите при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С, без ударов и вибраций.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Надевание	Раскатайте наколенник по бедру без складок
Складки под коленом	Расправьте; если складки сохраняются — к специалисту

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Мойте ежедневно тёплой водой с мягким мылом.
2. Сушите при комнатной температуре.
3. Не применяйте спиртосодержащие средства.

Срок / событие	Объём проверки
Ежедневно	осмотр и мытьё
Не реже 1 раза в 6 месяцев	проверка у специалиста
При проколе	замена

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — —; гарантийный срок — — при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Гарантия не распространяется на повреждения из-за превышения нагрузки, самостоятельной разборки или регулировки, недопустимых сред и нарушения инструкции.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ нет проколов и разрывов;
☐ наколенник чистый и сухой.

Заполняет специалист	
Размер / цвет	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
 107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
 ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия