

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

S07

Углепластиковый стопный модуль

Карбоновый стопный модуль



M2–M4

Группы подвижности



160 кг

Макс. масса пользователя



W2

Влагостойкость



Углеродное волокно

Материал

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/S07.pdf

КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ · ИЗ КАТАЛОГА BIONIKA TECH 2026

S07

Углепластиковый стопный модуль

🚶 M2–M4

📦 160 кг

💧 W2

🕸 Углеволокно



ПОЧЕМУ ЭТУ СТОПУ ВЫБИРАЮТ

Ультранизкопрофильный углепластиковый стопный модуль высотой 8 мм для протезов голени. Полноразмерная несущая пластина позволяет использовать его при очень ограниченной строительной высоте

ПРИМЕНЕНИЕ

Тонкая настройка упругости и комфорта внутри стопного узла; вспомогательный элемент, а не самостоятельная высокофункциональная стопа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Применяемость	Протезы голени и бедра (модульные)
Размерный ряд	20–30
Масса стопы	94 г
Системная высота	8 мм
Категории жёсткости	1–9
Соединение	Папа (пирамида)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЖЁСТКОСТИ

Нагрузка / кг	<40	40–50	51–65	66–80	81–95	96–110	111–125	126–140	141–160
Низкая	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средняя	2	3	4	5	6	7	8	9	—
Высокая	3	4	5	6	7	8	9	—	—

Категория на пересечении массы и нагрузки. «—» — сочетание не предусмотрено.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

SKU	Размер	Жёсткость	W
S07	20–30	1–9	W2

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Полноразмерная пластина

Системная высота 8 мм

Для протезов голени

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль стопы.

Особенности и дополнительные ракурсы



Поверхность модуля



Раздельный носок

Изделие является комплектующим протеза. Подбор, установка, юстировка и затяжка соединений выполняются только специалистом по протезированию. Пользователь не регулирует изделие и не разбирает его.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Тонкий углепластиковый модуль с системной высотой 8 мм для протезов голени. Пружинящая пластина добавляет упругость и энергоотдачу при перекате; модуль применяется в составе конструкции, определённой специалистом.

- Группы подвижности **M2–M4**; предельная масса пользователя с учётом переносимого груза — **160 кг**.
- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Пластина — несущий упругий элемент. Трещина, расслоение или побеление волокна означают утрату несущей способности: прекратите использование и обратитесь к специалисту. Не подрезайте пластину и не подгоняйте её форму.



Осмотр пластины перед использованием



Не подрезать и не подгонять



Соединение не трогать



Только в обуви своей высоты каблука



При расслоении — к специалисту

- Не подрезайте пластину по контуру обуви: нарушение кромки становится очагом расслоения.
- Не подтягивайте и не заменяйте крепёж самостоятельно.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W2 — водостойкое исполнение. Допускается контакт с пресной, морской и хлорированной водой, включая кратковременное погружение. После морской или хлорированной воды промойте изделие пресной водой и просушите. Класс относится к этому изделию; остальные модули протеза могут иметь более низкий класс — уточните у специалиста.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С, без ударов и вибраций.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Обувь	Только в обуви с той высотой каблука, под которую настроен протез
Скрип	Удалите песок, просушите; если звук сохраняется — к специалисту

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Протирайте модуль влажной тканью; удаляйте песок.
2. Сушите при комнатной температуре.
3. Не применяйте растворители и абразивы.

Срок / событие	Объём проверки
Перед каждым использованием	внешний осмотр изделия пользователем
Не реже 1 раза в год	контроль у специалиста, проверка соединений и настроек
После удара, падения, перегрузки	внеплановая проверка у специалиста

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **3 года**; гарантийный срок — **24 месяцев** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Гарантия не распространяется на повреждения из-за превышения нагрузки, самостоятельной разборки или регулировки, недопустимых сред и нарушения инструкции.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ кромка пластины не расслаивается;
- ☐ крепёж затянут;
- ☐ пластина сухая и чистая.

Заполняет специалист	
Размер / категория жёсткости	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия