

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

S10

Оболочка косметическая для стопы

Косметическая оболочка стопы



M2–M3

Группы подвижности



W1

Влагостойкость



Силикон стеклоткань

Материал

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/S10.pdf

КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ · ИЗ КАТАЛОГА BIONIKA TECH 2026



S10

Оболочка косметическая для стопы



M2-M3
Активность



W1
Влагостойкость



Силикон

Оболочка для стопы. Характеристики: материал — Силикон стеклоткань. Стопный компонент формирует опору, перекат и амортизацию при ходьбе; подбирается по размеру, стороне, весу и уровню активности пациента. Мягкий/косметический элемент протеза. Назначение: Мягкий/косметический элемент протеза нижней конечности.

Материал

Соединения

S10

стр. 26

Оболочка не является несущим элементом. Подбор размера и надевание оболочки на стопный модуль выполняет специалист по протезированию.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Косметическая оболочка надевается на стопный модуль, придаёт протезу форму стопы, защищает модуль от загрязнений и позволяет носить обычную обувь.

- Группы подвижности **M2–M3**.
- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Разрывы и потеря формы оболочки меняют посадку стопы в обуви и могут привести к скольжению протеза. При разрывах и задирах замените оболочку у специалиста; не подрезайте её самостоятельно.



Осмотр на разрывы
и задиры



Самостоятельно
не подрезать



Погружение
не допускается



При повреждении —
к специалисту

- Не снимайте и не надевайте оболочку на стопный модуль самостоятельно.
- Берегите оболочку от открытого огня и нагревательных приборов.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W1 — брызгозащищённое исполнение. Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна не допускаются. После намокания вытрите изделие насухо и просушите при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С, без ударов и вибраций.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Обувь	Оболочка рассчитана на обувь с высотой каблука, под которую настроен протез
Песок и вода	Не допускайте попадания песка и воды внутрь оболочки

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Протирайте оболочку влажной тканью с мягким мылом.
2. Сушите при комнатной температуре.
3. Не применяйте растворители и отбеливатели.

Срок / событие	Объём проверки
Ежедневно	осмотр на разрывы
Не реже 1 раза в год	проверка у специалиста
При разрыве	замена у специалиста

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **12 мес.**; гарантийный срок — **6 месяцев** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Оболочка — изнашиваемое изделие: гарантия распространяется на производственные недостатки; истирание и разрывы при эксплуатации гарантийными случаями не являются.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ оболочка не порвана;
- ☐ внутри нет песка и воды;
- ☐ изделие чистое и сухое.

Заполняет специалист	
Размер / сторона	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия