


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

S11

Стопа двухосная шарнирная

Стопа для модульных протезов голени и бедра

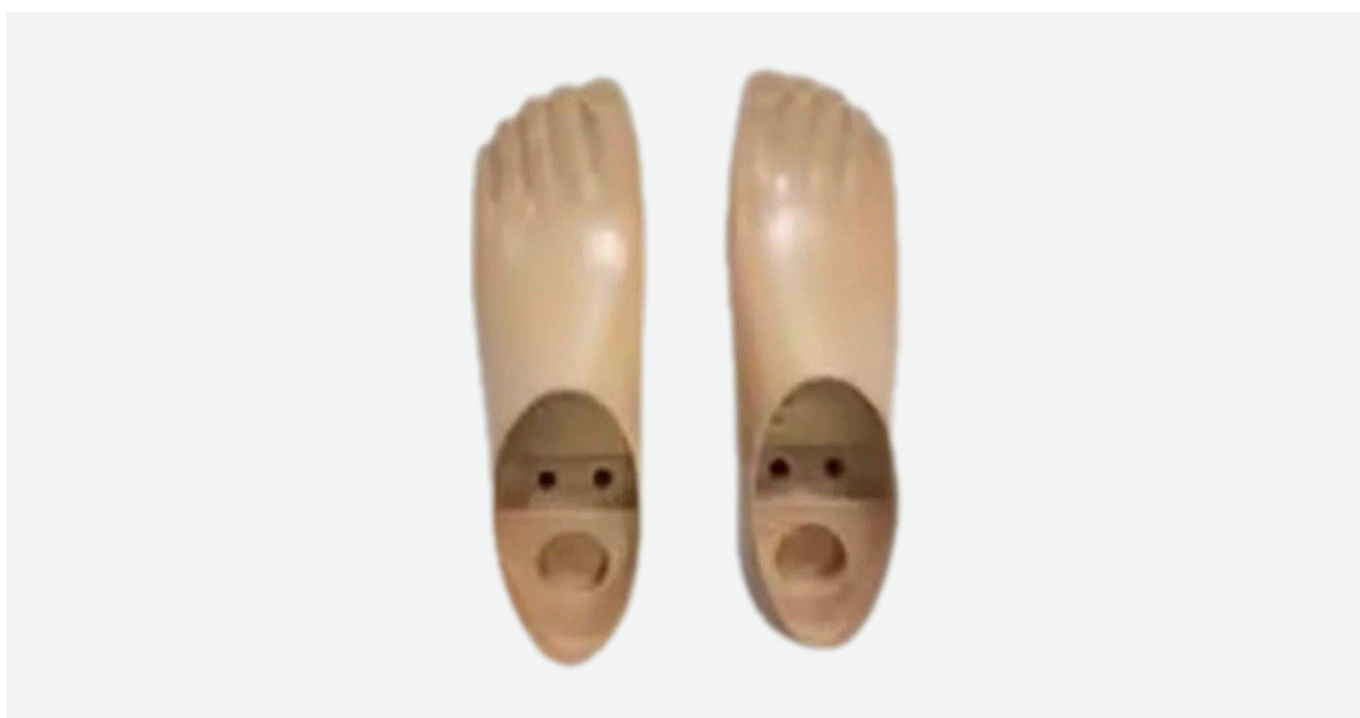

M1–M2

Группы подвижности



W1

Влагостойкость




Силикон

Материал

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/S11.pdf

КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ · ИЗ КАТАЛОГА BIONIKA TECH 2026

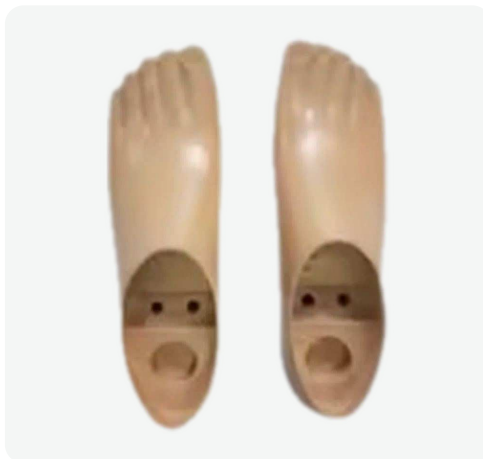

S11

Стопа двухосная шарнирная



M1–M2
Активность



W1
Влагостойкость



Силикон

Двуосная стопа. Характеристики: типоразмер 22-27; материал — Силикон; масса ≈ 450 г; тип соединения: Винтовое. Стопный компонент формирует опору, пережат и амортизацию при ходьбе; подбирается по размеру, стороне, весу и уровню активности пациента. Мягкий/косметический элемент протеза. Назначение: Мягкий/косметический элемент протеза нижней конечности.

Материал	Силикон
Соединения	Винтовое

S11

стр. 26

Изделие является комплектующим протеза. Подбор, установка, юстировка и затяжка соединений выполняются только специалистом по протезированию. Пользователь не регулирует изделие и не разбирает его.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Стопа формирует опору, пережат и амортизацию при ходьбе. Шарнирный голеностоп улучшает приспособление к неровной поверхности; статическая стопа не имеет подвижных элементов и проста в обслуживании.

- Группы подвижности **M1–M2**.
- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Стук, увеличение амплитуды или провал стопы вперёд или назад означают износ амортизирующих элементов. Стопа теряет опору при пережат, что приводит к падению — прекратите использование протеза и обратитесь к специалисту.



Осмотр перед
каждым использованием



Только в обуви
своей высоты каблука



Винт стопы
не трогать



Контроль у специалиста
ежегодно



При стуке —
к специалисту

- Проверяйте отсутствие стука и люфта в голеностопе.
- Не подтягивайте и не заменяйте крепёжный винт стопы.
- Не заменяйте амортизирующие элементы самостоятельно.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W1 — брызгозащищённое исполнение. Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна не допускаются. После намокания вытрите изделие насухо и просушите при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С, без ударов и вибраций.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Обувь	Только в обуви с той высотой каблука, под которую настроен протез
Ходьба без обуви	Не допускается: подошва быстро истирается
Появление стука	Прекратите использование и обратитесь к специалисту

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Протирайте стопу влажной тканью с мягким мылом.
2. Сушите при комнатной температуре.
3. Не применяйте растворители и абразивы.

Срок / событие	Объём проверки
Перед каждым использованием	внешний осмотр изделия пользователем
Не реже 1 раза в год	контроль у специалиста, проверка соединений и настроек
После удара, падения, перегрузки	внеплановая проверка у специалиста

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **2 года**; гарантийный срок — **12 месяцев** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Гарантия не распространяется на повреждения из-за превышения нагрузки, самостоятельной разборки или регулировки, недопустимых сред и нарушения инструкции.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ стопа не стучит и не имеет люфта;
- ☐ подошва не истёрта;
- ☐ крепёжный винт затянут;
- ☐ изделие сухое и чистое.

Заполняет специалист	
Размер / сторона	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия