

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

S19

Карбоновая стопа с удлинённой опорной пластиной

Стопа для модульных протезов голени и бедра



M1–M4

Группы подвижности



160 кг

Макс. масса пользователя



W0

Влагостойкость



Углеродное волокно

Материал

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку стопы выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/S19.pdf

S19 Карбоновая стопа с удлинённой опорной пластиной

ПОЧЕМУ ЭТУ СТОПУ ВЫБИРАЮТ

Карбоновая стопа с удлинённой опорной пластиной и системной высотой 175 мм. Геометрия ориентирована на контролируемый возврат энергии и продвижение голени вперёд

ПРИМЕНЕНИЕ

Активная ходьба и переменный темп; нужен контролируемый возврат энергии и продвижение голени вперёд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Применяемость	Протезы голени и бедра (модульные)
Размерный ряд	20–30
Масса стопы	403 г
Системная высота	175 мм
Категории жёсткости	1–9
Соединение	Папа (пирамида)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЖЁСТКОСТИ

Нагрузка / кг	<40	40–50	51–65	66–80	81–95	96–110	111–125	126–140	141–160
Низкая	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средняя	2	3	4	5	6	7	8	9	—
Высокая	3	4	5	6	7	8	9	—	—

Категория на пересечении массы и нагрузки. «—» — сочетание не предусмотрено. Категорию жёсткости подбирает специалист; масса учитывается вместе с переносимым грузом.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

SKU	Размер	Жёсткость	Влагостойкость
S19	20–30	1–9	W0

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Удлинённая пластина | Вынос голени вперёд | Пропорциональный отклик

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль стопы; Косметическая оболочка (VKP); Носок.

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАКУРСЫ



Стопа является комплектующим протеза. Подбор размера, стороны и категории жёсткости, установка, юстировка и затяжка соединения выполняются только специалистом по протезированию. Пользователь не регулирует стопу, не разбирает её и не снимает с протеза.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

S19 — карбоновая стопа с удлинённой опорной пластиной и системной высотой 175 мм. Геометрия ориентирована на контролируемый возврат энергии и продвижение голени вперёд при активной ходьбе с переменным темпом.

- **Удлинённая пластина** увеличивает рычаг отталкивания и плавность переката.
- Группы подвижности **M1–M4**; предельная масса пользователя с учётом переносимого груза — **160 кг**. Изделие предназначено для одного пациента.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Карбоновые элементы разрушаются внезапно, без предварительной деформации. Хруст при нагружении, побеление волокна, расслоение или трещина означают, что несущая способность нарушена: немедленно прекратите использование протеза и обратитесь к специалисту.

				
Осмотр перед каждым использованием	Карбон не обрезать и не дорабатывать	Соединение не трогать	Только в обуви своей высоты каблука	При трещине или хрусте — к специалисту

- Перед каждым использованием осматривайте стопу: на карбоне не должно быть трещин, расслоений, сколов, побеления волокна и глубоких царапин.
- При хрусте, щелчках, проседании, изменении переката или высоты протеза прекратите использование и обратитесь к специалисту.
- Не сверлите, не обрезайте и не шлифуйте карбон; не подтягивайте и не заменяйте винты соединения.
- После падения, удара или прыжка с высоты стопа подлежит проверке специалистом.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W0 — стопа не водостойкая. Контакт с водой не допускается: ни душ, ни бассейн, ни ходьба по лужам без защиты. Влага, попавшая под косметическую оболочку и в соединения, вызывает коррозию крепежа и повреждение узлов. Если стопа намокла, снимите оболочку, просушите и покажите протез специалисту.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С. Не допускайте попадания песка под косметическую оболочку.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Обувь	Носите протез только в обуви с той высотой каблука, под которую он настроен. Смена каблука нарушает юстировку и перекал.
Оболочка и носок	Стопа используется только в косметической оболочке и носке из комплекта; без них и без обуви карбон повреждается.
Скрип или щелчки	Промойте и просушите стопу с оболочкой; если звук сохраняется — к специалисту. Не смазывайте стопу.

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Удаляйте песок и грязь из-под косметической оболочки; протирайте стопу влажной тканью с мягким мылом.
2. Сушите при комнатной температуре — не феном, не на батарее, не под прямым солнцем.
3. Не применяйте растворители, отбеливатели, абразивы и мойку под давлением.

Срок / событие	Объём проверки
Перед каждым использованием	осмотр карбона, оболочки и соединения пользователем
Не реже 1 раза в год	контроль у специалиста: соединение, категория жёсткости, оболочка
После удара, падения, перегрузки	внеплановая проверка у специалиста

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **3 года**; гарантийный срок — **24 месяца** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Гарантия не распространяется на повреждения из-за превышения массы или нагрузки, доработки карбона, недопустимых сред и нарушения инструкции, а также на износ оболочки и носка.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; карбоновые и металлические части передаются специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ на карбоне нет трещин, расслоений и побеления волокна;
- ☐ косметическая оболочка цела, под ней нет песка и воды;
- ☐ стопа не хрустит и не щёлкает, пережат и высота протеза не изменились;
- ☐ протез надет в обуви своей высоты каблука;

Заполняет специалист	
Размер / сторона / категория жёсткости	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия