

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

S25

Карбоновая стопа анатомическая

Стопа для модульных протезов голени и бедра



M1–M3

Группы подвижности



125 кг

Макс. масса пользователя



W1

Влагостойкость



Углеродное волокно

Материал

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку стопы выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/S25.pdf

S25 Карбоновая стопа анатомическая

ПОЧЕМУ ЭТУ СТОПУ ВЫБИРАЮТ

Анатомическая карбоновая стопа для низкого и среднего уровней нагрузки. Разделённый передний отдел и индивидуальная матрица по размеру и массе позволяют точнее подобрать категорию жёсткости

ПРИМЕНЕНИЕ

Нужна более естественная опора и работа переднего отдела; акцент на анатомичный перека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Применяемость	Протезы голени и бедра (модульные)
Размерный ряд	20–30
Масса стопы	670 г
Системная высота	170 мм
Категории жёсткости	1–9
Соединение	Папа (пирамида)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЖЁСТКОСТИ · ДО 125 КГ

Низкая нагрузка

Размер / кг	45–52	53–59	60–68	69–77	78–88	89–100	101–116	117–125
22	1	1	2	3	4	—	—	—
23–24	1	1	2	3	4	5	—	—
25–26	2	2	2	3	4	5	6	7
27–28	—	—	3	3	4	5	6	7
29–30	—	—	—	—	4	5	6	7

Средняя нагрузка

Размер / кг	45–52	53–59	60–68	69–77	78–88	89–100	101–116	117–125
22	1	2	3	4	—	—	—	—
23–24	1	2	3	4	5	—	—	—
25–26	2	2	3	4	5	6	7	—
27–28	—	—	3	4	5	6	7	—
29–30	—	—	—	4	5	6	7	—

Категория — на пересечении размера стопы и массы пользователя. «—» — сочетание не предусмотрено. Категорию жёсткости подбирает специалист; масса учитывается вместе с переносимым грузом.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

SKU	Размер	Жёсткость	Влагостойкость
S25	20–30	1–9	W1

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Анатомическая форма	Соединительный вал	Размерно-весовой подбор
---------------------	--------------------	-------------------------

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль стопы; Косметическая оболочка (VP); Носок.

Стопа является комплектующим протеза. Подбор размера, стороны и категории жёсткости, установка, юстировка и затяжка соединения выполняются только специалистом по протезированию. Пользователь не регулирует стопу, не разбирает её и не снимает с протеза.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

S25 — анатомическая карбоновая стопа с разделённым передним отделом для низкого и среднего уровней нагрузки. Категория жёсткости подбирается по размеру стопы и массе пользователя, что даёт более точный и естественный пережат.

- **Предельная масса 125 кг, группы подвижности М1–М3.** Стопа не рассчитана на спорт и высокие ударные нагрузки.
- Группы подвижности **М1–М3**; предельная масса пользователя с учётом переносимого груза — **125 кг**. Изделие предназначено для одного пациента.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Карбоновые элементы разрушаются внезапно, без предварительной деформации. Хруст при нагружении, побеление волокна, расслоение или трещина означают, что несущая способность нарушена: немедленно прекратите использование протеза и обратитесь к специалисту.

				
Осмотр перед каждым использованием	Карбон не обрезать и не дорабатывать	Соединение не трогать	Только в обуви своей высоты каблука	При трещине или хрусте — к специалисту

- Перед каждым использованием осматривайте стопу: на карбоне не должно быть трещин, расслоений, сколов, побеления волокна и глубоких царапин.
- При хрусте, щелчках, проседании, изменении пережата или высоты протеза прекратите использование и обратитесь к специалисту.
- Не сверлите, не обрезайте и не шлифуйте карбон; не подтягивайте и не заменяйте винты соединения.
- После падения, удара или прыжка с высоты стопа подлежит проверке специалистом.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W1 — брызгозащищённое исполнение. Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна в протезе не допускаются. После намокания снимите косметическую оболочку, просушите стопу и оболочку при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С. Не допускайте попадания песка под косметическую оболочку.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Обувь	Носите протез только в обуви с той высотой каблука, под которую он настроен. Смена каблука нарушает юстировку и пережат.
Оболочка и носок	Стопа используется только в косметической оболочке и носке из комплекта; без них и без обуви карбон повреждается.
Подбор обуви	Разделённый передний отдел требует обуви с достаточным объёмом носка; тесная обувь деформирует оболочку.
Скрип или щелчки	Промойте и просушите стопу с оболочкой; если звук сохраняется — к специалисту. Не смазывайте стопу.

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Удаляйте песок и грязь из-под косметической оболочки; протирайте стопу влажной тканью с мягким мылом.
2. Сушите при комнатной температуре — не феном, не на батарее, не под прямым солнцем.
3. Не применяйте растворители, отбеливатели, абразивы и мойку под давлением.

Срок / событие	Объём проверки
Перед каждым использованием	осмотр карбона, оболочки и соединения пользователем
Не реже 1 раза в год	контроль у специалиста: соединение, категория жёсткости, оболочка
После удара, падения, перегрузки	внеплановая проверка у специалиста

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **3 года**; гарантийный срок — **24 месяца** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Гарантия не распространяется на повреждения из-за превышения массы или нагрузки, доработки карбона, недопустимых сред и нарушения инструкции, а также на износ оболочки и носка.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; карбоновые и металлические части передаются специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ на карбоне нет трещин, расслоений и побеления волокна;
- ☐ косметическая оболочка цела, под ней нет песка и воды;
- ☐ стопа не хрустит и не щёлкает, пережат и высота протеза не изменились;
- ☐ протез надет в обуви своей высоты каблука;

Заполняет специалист	
Размер / сторона / категория жёсткости	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия