


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

Z18

Замок для силиконового/ гелевого лайнера

Замок лайнера для приёмной гильзы протеза

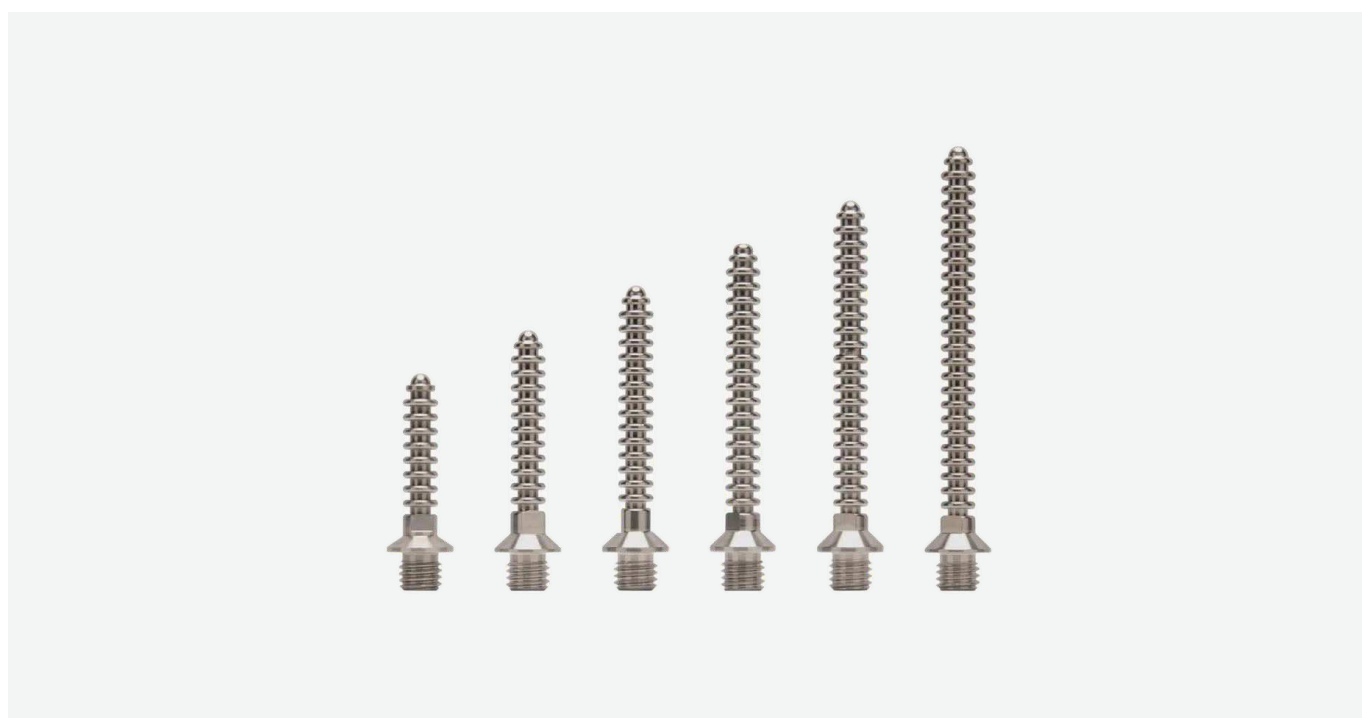

125 кг

Макс. масса пользователя



W1

Влагостойкость



Сталь

Материал

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/Z18.pdf

КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ · ИЗ КАТАЛОГА BIONIKA TECH 2026

Z18
**Замок для силиконового/
гелевого лайнера**

  125 кг  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер	48 мм
Материал	сталь
Применяемость	Протезы голени и бедра с замковой фиксацией лайнера
Соединение 1	Замок
Соединение 2	Резьба
Гарантия	12 мес.
Срок службы	3 года
Температура эксплуатации	-10...+45 °C, влажн. 20–90 % (без конденсации)
Температура хранения	-20...+60 °C, влажн. 20–90 %, без вибраций и ударов

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Замок лайнера/подвеса: фиксация культеприёмного лайнера в гильзе.

 Фиксация

 48 мм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ	
SKU	Размер
Z18-48	48 мм
Z18-58	58 мм
Z18-68	68 мм
Z18-78	78 мм
Z18-88	88 мм
Z18-98	98 мм

СОВМЕСТИМОСТЬ / ФУНКЦИИ
Модульная система (пирамида/гнездо), типоразмер 30/34 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Замок; ответная часть/штифт; крепёж.

Изделие является комплектующим протеза. Подбор, установка, юстировка и затяжка соединений выполняются только специалистом по протезированию. Пользователь не регулирует изделие и не разбирает его.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Замок устанавливается в дистальную часть приёмной гильзы и фиксирует пин силиконового или гелевого лайнера при вкладывании культи в гильзу. Расфиксация — кнопкой замка. Так обеспечивается удержание протеза на культе.

- предельная масса пользователя с учётом переносимого груза — **125 кг**.
- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Неполная фиксация пина приводит к соскальзыванию протеза с культи при переносе ноги и падению. После каждого надевания убедитесь, что замок сработал со щелчками, и проверьте фиксацию, потянув протез вниз.

				
Очистить пин перед соединением	Проверить фиксацию потягиванием	Расфиксация только сидя	Замок не смазывать	При отказе фиксации — к специалисту

- Перед надеванием очищайте пин лайнера и отверстие замка от грязи, песка, ворса и крема.
- Вводите пин строго по оси культи.
- Не нажимайте кнопку расфиксации, стоя на протезе; не смазывайте замок.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W1 — брызгозащищённое исполнение. Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна не допускаются. После намокания вытрите изделие насухо и просушите при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от -10 до $+45$ °C; хранения и транспортировки от -20 до $+60$ °C, без ударов и вибраций.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Надевание	Введите культю с лайнером в гильзу до щелчков замка; проверьте фиксацию потягиванием
Снятие	Сидя нажмите кнопку и извлеките культю
Затруднённый ход	Не прикладывайте силу — обратитесь к специалисту

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Протирайте изделие влажной мягкой тканью с мягким мылом, затем вытрите насухо.
2. При необходимости продезинфицируйте поверхность салфеткой с изопропиловым спиртом.
3. Не применяйте растворители, отбеливатели, абразивы, сжатый воздух и мойку под давлением.

Срок / событие	Объём проверки
Перед каждым использованием	внешний осмотр изделия пользователем
Не реже 1 раза в год	контроль у специалиста, проверка соединений и настроек
После удара, падения, перегрузки	внеплановая проверка у специалиста

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **3 года**; гарантийный срок — **12 месяцев** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Гарантия не распространяется на повреждения из-за превышения нагрузки, самостоятельной разборки или регулировки, недопустимых сред и нарушения инструкции.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ замок фиксирует пин со щелчками;
- ☐ при потягивании протез не снимается;
- ☐ кнопка не заедает;
- ☐ отверстие замка чистое.

Заполняет специалист	
Исполнение / совместимый пин	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия