

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

## Z21

### Ремень/подвес для протеза

Ремень / наружный подвес протеза



**W1**

Влагостойкость

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · [bionika.tech/manual/Z21.pdf](https://bionika.tech/manual/Z21.pdf)

КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ · ИЗ КАТАЛОГА BIONIKA TECH 2026



**z21**

## Ремень/подвес для протеза

**W1**



**W1**

Благостойкость

Ремень/подвес для протеза. Мягкий, косметический или вспомогательный элемент протеза: используется для защиты, внешнего оформления, комфорта посадки либо крепления.

Материал

Соединения

**z21**

стр. 74

**Изделие — вспомогательное средство подвеса.** Подбор размера и точки крепления к протезу определяет специалист по протезированию.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Ремень-подвес удерживает протез на конечности охватом бедра или таза. Применяется как основной или дополнительный подвес, а также в период освоения протеза.

- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

## 2 БЕЗОПАСНОСТЬ

**ВНИМАНИЕ.** Чрезмерно затянутый ремень нарушает кровообращение и вызывает онемение и потёртости, слабо затянутый не удерживает протез. Затягивайте до плотного, но комфортного охвата; при онемении ослабьте.



Осмотр кожи  
под ремнём



Только для  
одного пациента



Стирать  
и просушивать



При онемении —  
к специалисту

- Ежедневно осматривайте кожу под ремнём.
- Не носите ремень поверх складок одежды.
- Заменяйте изделие при износе застёжки и растяжении.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

## 3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

**W1 — брызгозащищённое исполнение.** Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна не допускаются. После намокания вытрите изделие насухо и просушите при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С, без ударов и вибраций.

## 4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

| Ситуация        | Что делать                                 |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Натяжение       | Плотно, без онемения и боли                |
| Отёк конечности | Ослабьте ремень и обратитесь к специалисту |

## 5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Стирайте вручную при температуре не выше 40 °С, застегнув застёжки.
2. Сушите в расправленном виде вдали от нагревательных приборов.
3. Не применяйте отбеливатели.

| Срок / событие             | Объём проверки                   |
|----------------------------|----------------------------------|
| Ежедневно                  | осмотр ремня и кожи              |
| Не реже 1 раза в 6 месяцев | проверка креплений у специалиста |
| При износе                 | замена                           |

## 6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **3 года**; гарантийный срок — **6 месяцев** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Ремень — изнашиваемое изделие: гарантия распространяется на производственные недостатки; растяжение и износ застёжки гарантийными случаями не являются.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

## 7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ ремень не растянут, застёжка держит;
- ☐ под ремнём нет потёртостей;
- ☐ изделие чистое и сухое.

| Заполняет специалист         |       |
|------------------------------|-------|
| Размер                       | _____ |
| Серийный номер / дата выдачи | _____ |
| Специалист / организация     | _____ |

**ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH**  
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6  
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001  
**+7 (495) 067-34-77 · [info@bionika.tech](mailto:info@bionika.tech) · [bionika.tech](http://bionika.tech)**



Актуальная версия